


OVITRELLE® Fertigpen

Anleitung zur Selbstinjektion

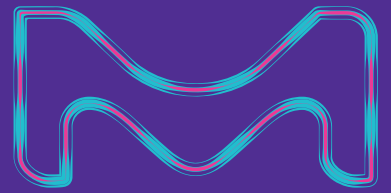

1



Entfernen Sie die Verschlusskappe des Pens.

2



Ziehen Sie die Schutzfolie von der Injektionsnadel ab.

3



Schrauben Sie die Injektionsnadel im Uhrzeigersinn am Gewinde des Pens fest und entfernen Sie die Schutzkappe.

4




Drehen Sie den Injektionsknopf, bis die Zahl „250“ in der Dosieranzeige erscheint.

5



Stechen Sie die Nadel senkrecht an der desinfizierten Injektionsstelle in die Haut und drücken Sie den Injektionsknopf **5 Sekunden**.

6

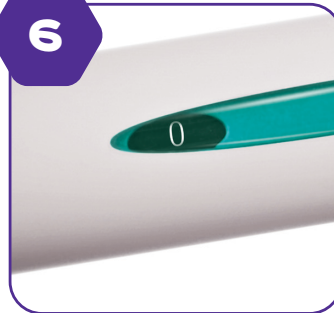

In der Dosieranzeige erscheint ein Punkt, d.h. Sie haben die gesamte Dosis injiziert.

7





Setzen Sie die Schutzkappe auf die Nadel und entfernen Sie diese gegen den Uhrzeigersinn. Setzen Sie die Verschlusskappe auf den Fertigpen.

Der Fertigpen muss im Kühlschrank (2–8 °C) gelagert werden.

Diese Anleitung ersetzt nicht die Patienteninformation (Packungsbeilage) des OVITRELLE® Fertigpens. Bitte lesen Sie diese vor der ersten Anwendung sorgfältig durch.

MERCK

OVITRELLE® – auch als Pen

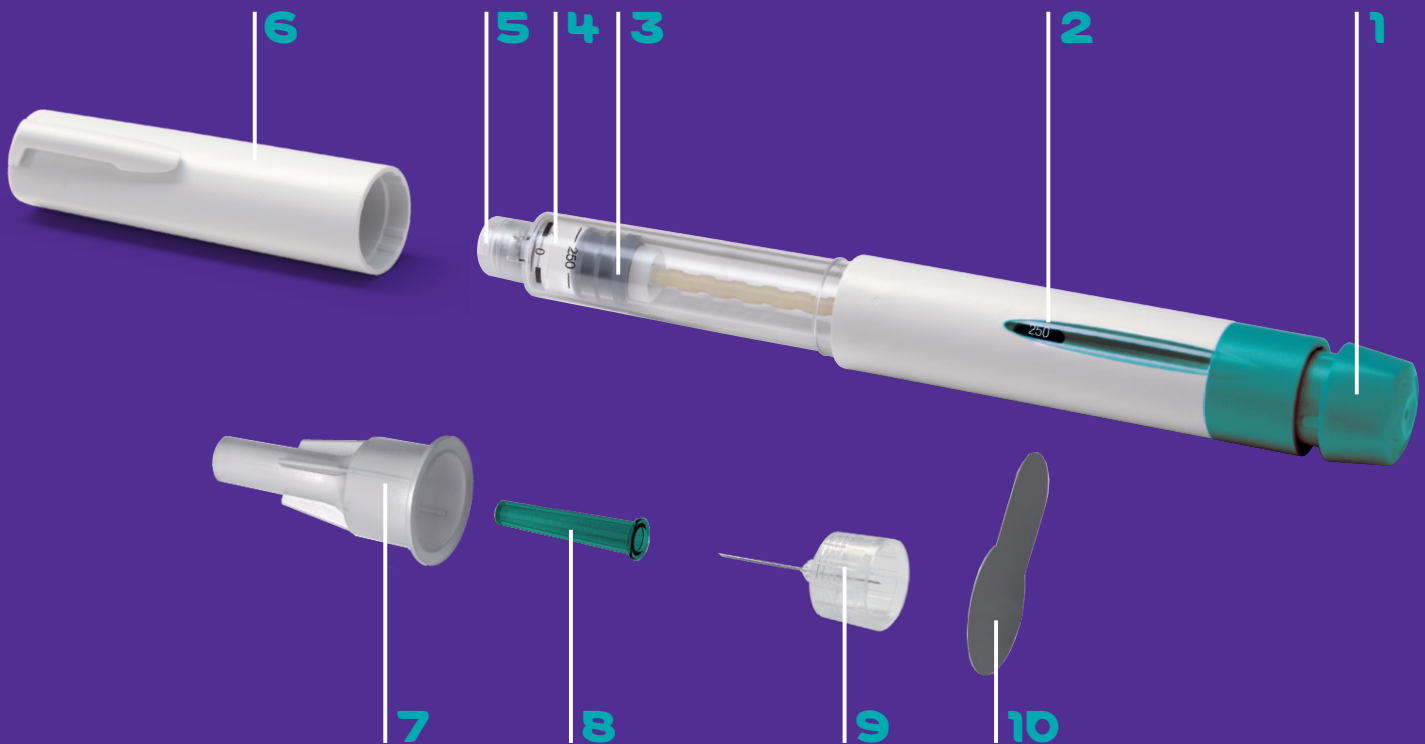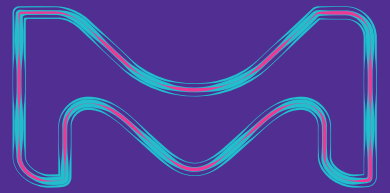

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Injektionsknopf | 6 | Verschlusskappe |
| 2 | Dosierungsanzeige | 7 | Äussere Nadelschutzkappe |
| 3 | Kolben | 8 | Innere Nadelschutzkappe |
| 4 | Reservoir mit Injektionslösung | 9 | Entfernbarer Injektionsnadel |
| 5 | Nadelverbindung mit Gewinde | 10 | Abziehbare Schutzfolie |

Die auf dem Reservoir (4) sichtbare Skala dient dazu, Ihnen das aktuelle Volumen an Injektionslösung anzuzeigen, sie ist nicht zur Dosiseinstellung gedacht.